

Sensitivity Serum

WITH PATENTED HYDROXYAPATITE

PRO RANGE

Zawiera mieszankę specjalnie dobranych składników zaprojektowanych, aby pomóc w zapobieganiu i zmniejszaniu wrażliwości zębów. Wzbogacone o hydroksyapatyt i nacyony wapniem, fluorem, ksylitolem i witaminę E.



Zawiera:

2 x 3ml strzykawkę z serum


2 x nakładkę aplikatora

Instrukcja

Serum jest przeznaczone do użytku z nakładką dopasowaną do Ciebie przez Twojego dentystę.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej:

1. Zdjąć nasadkę strzykawkę i przykręcić końcówkę aplikatora.
2. Nałożyć serum na jedną z dwóch nakładek. Zaczynaj od jednej strony i wyciśnij serum przesuwając wzdłuż nakładki. (rys. A)

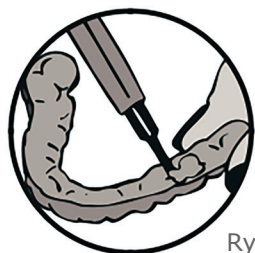

Rys. A

3. Jeśli używasz serum na górnych i dolnych zębach, powtórz ten proces i nałóż serum na drugą nakładkę.
4. Włóż obie wypełnione serum nakładki do jamy ustnej i wyrównaj je na zębach. Jeśli nadmiar serum wypłynie, wytrzyj go chusteczką. (rys. B)



Rys. B

Wskazówka: Jeśli chcesz użyć serum tylko w wybranym miejscu, odpowiednio nałóż je na nakładkę.

Uwaga: Wzmożona produkcja śliny jest normalnym zjawiskiem. Twoje ciało myśli, że ma w ustach jedzenie i próbuje je strawić. Ślinę można połykać, wycierać chusteczką lub wypłuć nadmiar.

5. Po 10-15 minutach wyjmij nakładki z ust i wyczyść je szczoteczką do zębów i zimną wodą. Jeśli masz w ustach nadmiar serum wypłuj go, ale postaraj się nie płukać ust przez co najmniej 30 min, aby serum mogło dalej działać (Z tego powodu zaleca się użycie serum po umyciu zębów przed snem.)



Rys. C

Wskazówka: Serum można również nakładać bezpośrednio na wrażliwy ząb, używając czystego palca do wcierania serum przez 1-2 minuty.

Uwaga: Sensitivity serum jest zalecane do użytku codziennego. Jeśli wcześniej nie korzystałeś z produktu, możesz zacząć od 3-4 aplikacji tygodniowo. W razie potrzeby serum można stosować raz dziennie, na noc.

Ważne: Do stosowania wyłącznie u dorosłych. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy stomatologiczne należy skonsultować się z dentystą przed użyciem, zwłaszcza jeśli masz zapalenie dziąsła lub miałeś niedawno ekstrakcję zęba.

Eco-Conscious Packaging

Syringe made with biodegradable eco plastic Packaging made of recyclable materials

WHITEWASH
LABORATORIES



UK: Tooth Towers, Lagonda Road, Cowpen Lane Ind.
Est., Billingham, TS23 4JA, United Kingdom
EU: Cosmetics Rep OU, Juhkental 8,
Tallinn 10132, Estonia
whitewashlaboratories.com