

Opis bezpieczeństwa

1. Nie należy spożywać posiłków i napojów przez co najmniej 1 godzinę po nałożeniu.
2. **Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie stosować, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone bądź po upływie terminu ważności. Nie potykać produktu. Nie przekraczać zalecanej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących stosowania z innymi lekami. Należy skonsultować się z lekarzem.
3. **Unikać kontaktu z oczami:** w przypadku dostania się do oczu przepłukać dużą ilością wody.
4. **Termin ważności** odnosi się do produktu nieotwartego i właściwie przechowywanego. Zamknąć tubkę po użyciu.
5. **Przechowywać w temperaturze** od 5°C do 30°C z dala od bezpośredniego źródła ciepła.
6. W przypadku wystąpienia problemów w trakcie leczenia przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu w trakcie stosowania żelu ELGYDIUM CLINIC Cicalium należy go zgłosić producentowi i właściwemu organowi lokalnemu.